


CPR Training Model

— **Sherpa**

USER'S GUIDE

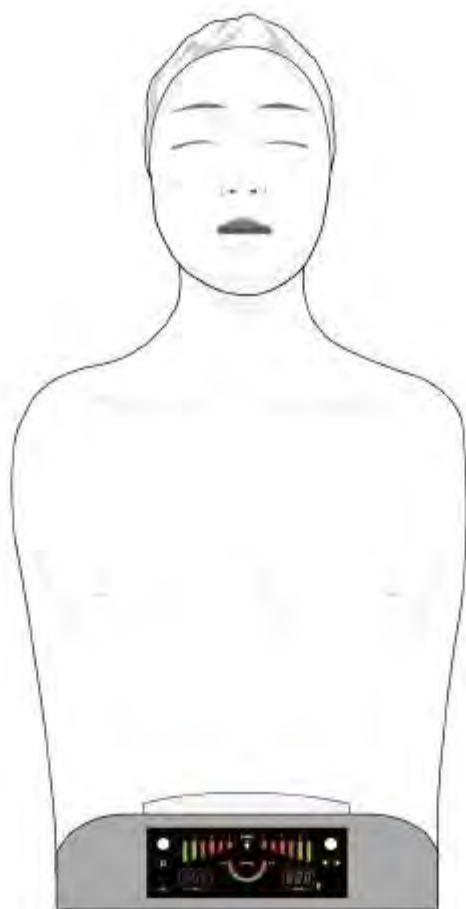

■ 제품 정보

제품명 심씨소영술 훈련모형 (Sherpa)

모델명 BT-SEEM

제조사 주식회사 버티

제조국 대한민국

인증번호 MSIP-REM-B4T-SEEM

적합성평가를 받은자의 상호 (주)버티



■ 제품 사양

크 기 330 x 620 x 210 mm

무 게 3.9kg

사용 배터리 LR14 - 6개 (C타입, 1.5V)

전원 어댑터 Input : AC 100-240V ~, 50/60Hz, 0.4A

Output : DC 12V, 1.5A

■ 제품 서비스 문의

홈페이지 www.btinc.co.kr

주 소 경기도 고양시 덕양구 통일로 140, A동 313호

연 락 처 02-2038-2903

E-mail btinc@btinc.co.kr



■ 배터리 폐기 시 주의사항

사용한 배터리를 폐기할 때는 해당 지역의 관련 규정에 따르십시오.

주의사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 숙지하여 주시기 바랍니다.
주의사항을 이행하지 않아 발생하는 모든 사고에 대하여 회사(제조회사)에서는 배상의 책임을 지지 않습니다.


- ① 제공된 구성품 이외의 기기를 연결하여 사용하지 마십시오.
- ② 설명서에 기재되어 있는 사항 외에 다른 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
- ③ 제품을 임의로 분해 또는 개조할 경우 서비스(A/S)를 받으실 수 없습니다. 또한, 상업적 목적으로 제품을 개조 또는 모방할 경우 법적 제재를 받게 되오니 주의하시기 바랍니다.
- ④ 이용 중 제품에서 타는 냄새가 나거나 열이 심하게 발생하는 경우에는 배터리 또는 전원 어댑터를 분리 후 회사로 문의하여 주십시오.
- ⑤ 제품을 물에 빠뜨리거나 습기가 찬 곳에 장시간 보관하지 마십시오.
- ⑥ 자석 또는 자기장 근처에 제품을 두지 마십시오.
- ⑦ 천둥, 번개가 치는 날씨에는 낙뢰 및 화재, 감전의 위험이 있으니 반드시 전원 어댑터의 코드를 빼놓으시기 바랍니다.
- ⑧ 겨울 혹한기나 여름 혹서기에는 제품이 오동작 할 수 있습니다.
(동작온도 : 0°C ~ 40°C, 보관온도 : 0°C ~ 40°C)
- ⑨ 제품 보관 시 너무 뜨거운 장소나 추운 곳은 가능한 피해 주십시오. 외관 변형이나 제품 내부의 손상이 발생할 수 있습니다.
- ⑩ 제품의 표면에 솔벤트 유형의 강력 세제나 화학약품 등이 묻을 경우, 변색 또는 코팅/도색이 벗겨질 수 있으므로 각별히 유의하여 주시고, 묻었을 경우에는 즉시 부드러운 천을 이용해 가볍게 닦아내 주시기 바랍니다.
- ⑪ 제품의 성능향상을 위해서 별도의 고지 없이 당사에서 제품 사양을 수정 또는 변경할 수 있습니다.

■ 시작하기


저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

심폐소생술은 환자가 심장박동이나 호흡이 멈추었을 때 인공적으로 호흡을 유지하고 혈액을 순환시켜 심장과 뇌에 혈액을 공급해주는 중요한 응급처치법입니다.

Sherpa(셰르파)는 이러한 심폐소생술의 중요성을 알고, 응급상황 발생 시 적절히 대처하는 것을 배우도록 만든 교육용 심폐소생술 마네킹입니다.

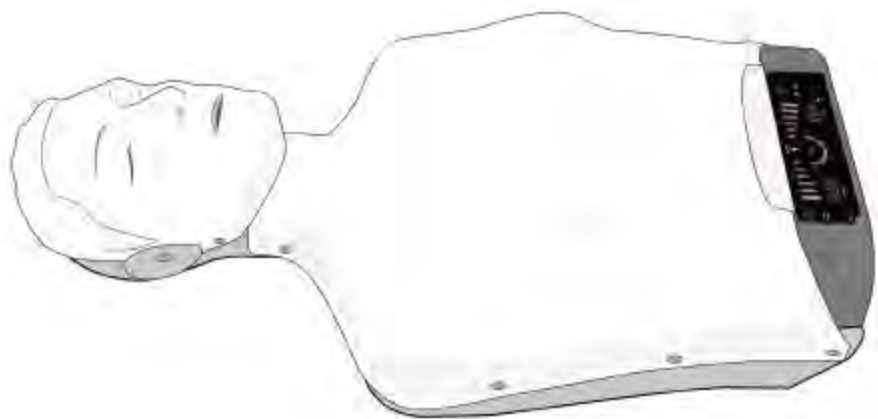

제품 구성

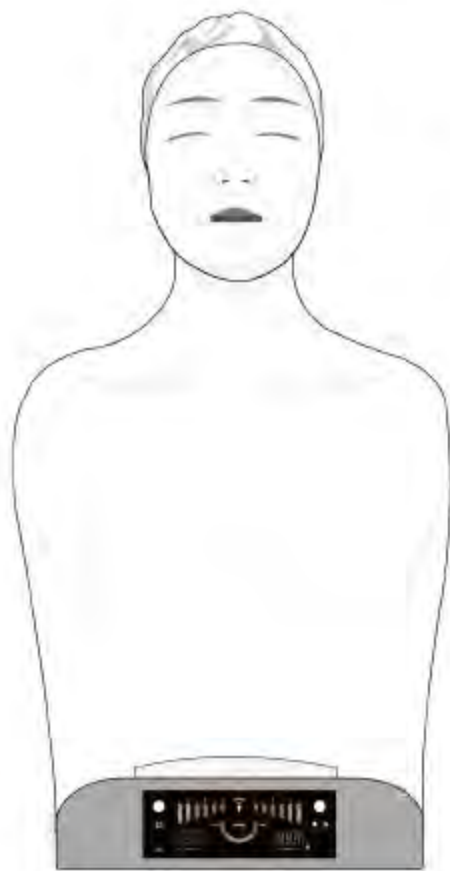

성인 상반신 모형



자석패드



메 주머니




전원 어댑터



스킨

* 기타 - 보관용 가방, 사용 설명서

제품 명칭

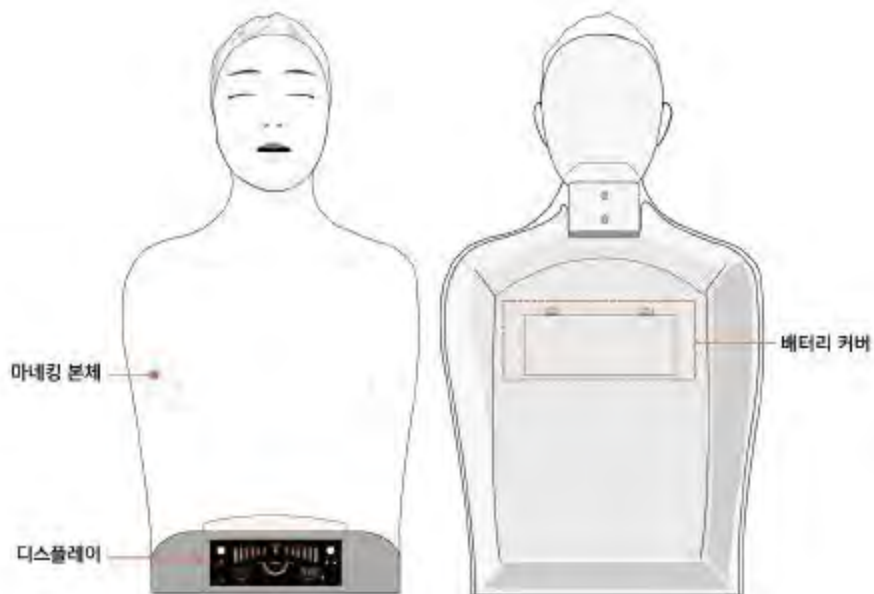


■ 전원 사용방법

<배터리 사용방법>



* 배터리 케이스는 마네킹 뒷부분에 위치합니다.

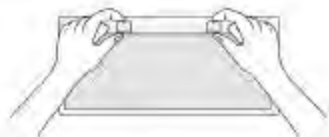



- ① 마네킹 뒷면에 위치한 배터리 커버를 엽니다.
- ② 배터리 홀더에 총 6개의 건전지를 (+), (-) 전극 방향에 맞게 삽입합니다.
- ③ 배터리는 LR14 (C타입, 1.5V) 표준 배터리를 사용합니다.

<외부전원 사용방법>



* 전원 어댑터는 제공된 정격 전원 어댑터를 사용하십시오.

인공폐 교체방법

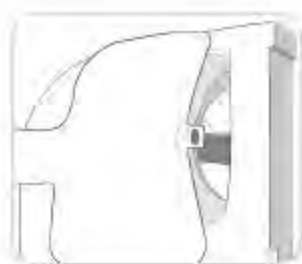
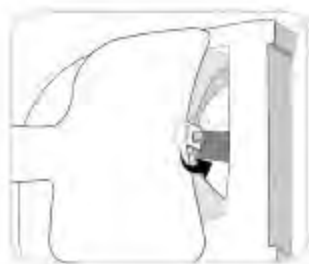


- ① 마네킹의 가슴 피부를 복부까지 벗겨내십시오.
- ② 마네킹의 고개를 젖힌 후 내부에 연결된 폐 주머니 어댑터를 아래로 당겨 제거하여 주십시오.
- ③ 마네킹 중앙부에 장착되어 있는 폐 주머니 아랫부분을 제거하여 주십시오.

* 폐 주머니를 장착할 때는 역순으로 장착하면 됩니다.

자석패드 사용방법

<AED 패드>

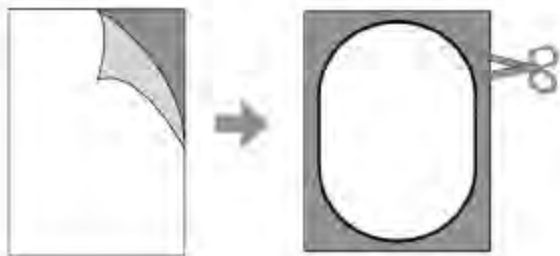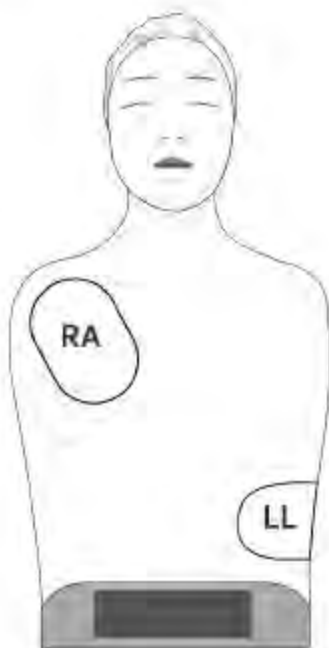

- ① 교육용 AED를 준비하십시오.
- ② 제공된 자석패드의 하얀색 이형지를 제거합니다.
- ③ 교육용 AED패드의 접착면에 자석패드를 부착하십시오.
- ④ 교육용 AED패드 사이즈에 맞게 채단하여 사용하십시오.

■ 제품 기능

<가슴 압박>



- ① 배터리삽입 또는 전원 어댑터 연결 후 전원 스위치를 켜십시오.
- ② 디스플레이가 켜지면 선택 옵션 설정 후 가슴 압박을 시작합니다.
- ③ 디스플레이에는 압박 깊이, 압박 속도, 심장 횟수, 총 횟수 등이 표시됩니다.

■ 제품 기능

<기도확보>



<인공호흡>



- ① 마네킹의 고개를 젖혀 기도를 개방합니다.
- ② 마네킹의 코를 막은 후, 입으로 숨을 불어 넣습니다. (가슴이 부풀어 오르는 것을 확인합니다.)

■ 제품 기능

<화면 레이아웃>



① 정상 압박 횟수 / 압박 깊이 표시

실시간으로 1회 압박 깊이가 표시되며 압박 중단시 정상압박 횟수가 숫자로 표시됩니다.

② 압박 속도 표시

실시간으로 압박 속도의 느림, 정상, 빠름을 LED 색으로 상시 확인할 수 있습니다.

③ 총 압박 횟수 표시

사용자가 실시한 총 압박 횟수가 표시됩니다.

④ 배터리 상태 표시

전원 상태가 LED로 표시됩니다. (배터리 정상 : 파란색 LED / 배터리 부족: 빨간색 LED 점등)

⑤ 선택 옵션 버튼

정상 압박음 출력과 압박 깊이, 압박 속도의 LED 표시를 ON/OFF 할 수 있습니다.

⑥ 압박 깊이 표시 / 불완전 이완 표시

실시간 압박 깊이의 부족, 정상, 과도 / 불완전 이완을 LED로 상시 확인할 수 있습니다.

⑦ 재시작 버튼

현재 상태에서 재시작을 할 수 있습니다. 정상 압박 횟수①과 총 압박 횟수③이 초기화 됩니다.

* 이 제품은 약 5분간 가슴 압박에 대한 감지가 없을 경우 디스플레이의 표시등을 모두 끄고 대기 상태 모드로 진입합니다. 대기 상태 모드에서 사용자가 ⑤이나 ⑦ 버튼을 누르면 제품이 다시 동작하게 됩니다.

<압박 깊이 표시>


압박 깊이 표시 LED	깊이
	부족
	정상
	과도

<압박 속도 표시>


압박 속도 표시 LED	속도
	느림
	정상
	빠름

Exchange of Skin / 피부 교체방법

<Removal of Skin / 피부 제거>

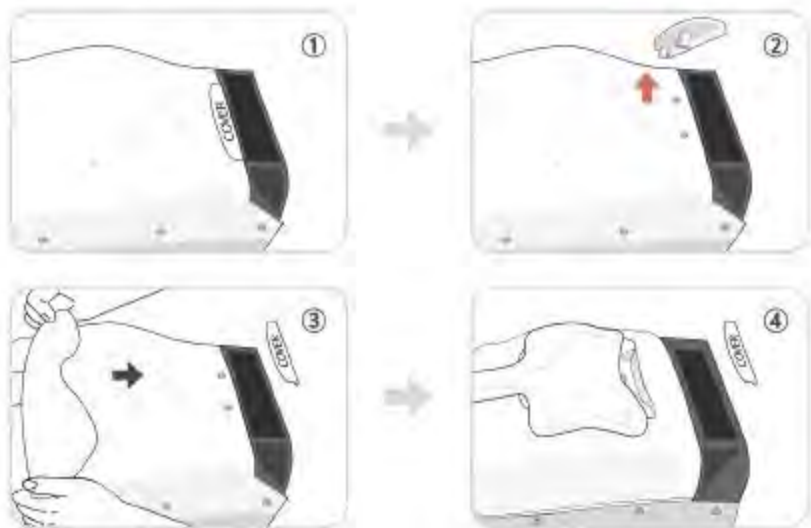

<Install of Skin / 피부 설치>

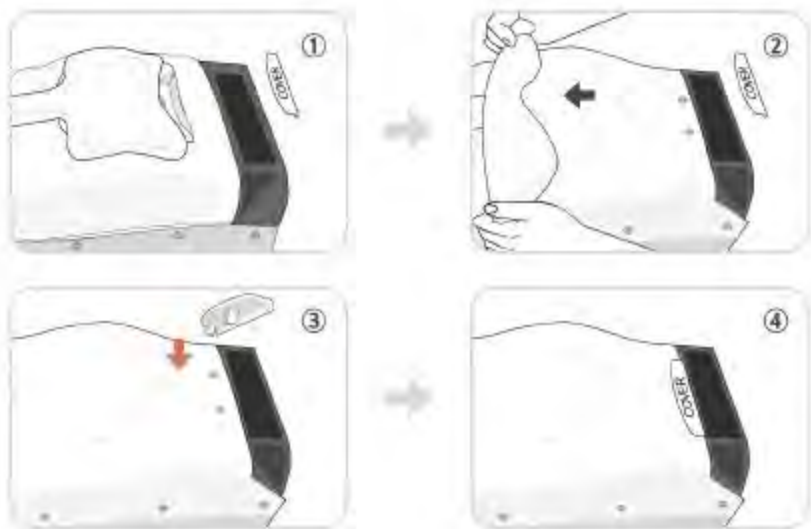

■ 품질보증서

제 품 명	Sherpa(셰르파)	모 델 명	BT-SEEM
고 객 명		연 락 처	
주 소			
구 입 처		구 입 일	년 월 일

* 이 보증서는 국내에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

품질보증기간	제품 구입일로부터 1년 이내
--------	-----------------

이 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사에 합격한 제품입니다. 구매자가 제품을 구입한 날로부터 1년간 제품의 결함이 없음을 보증합니다. 단, 소모품은 제외합니다. 제품의 품질보증을 위해서는 보증기간 확인을 위해 구입처 및 구입일이 명시된 보증서 또는 영수증 사본을 동봉하셔야 합니다. 위의 문서를 동봉하지 않으셨거나, 문서의 판독이 어려운 경우 무상서비스가 제한 될 수 있습니다. 또한 아래와 같은 경우 서비스가 제한 되거나 보증기간 중일지라도 유상 서비스로 진행 될 수 있습니다.

제품 고장이 아닌 경우	사용설명서 미숙지로 인한 서비스 접수시
	소비자의 고의 또는 과실로 제품의 부품 및 외관을 훼손한 경우
소비자 과실로 고장난 경우	제품에 붙어 있는 스티커, 라벨이 손상된 경우 및 외관이 파손되어 있는 경우
	외부충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상시
	임의로 분해 등 사용자의 부주의 및 과실로 손상된 경우
그 밖의 경우	사용설명서 내의 주의 사항을 지키지 않아 발생한 고장
	천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 수해 등)에 의한 고장 발생시
	정식 유통과정을 거치지 않고 구입한 경우

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 왕복 운송비 등의 요금을 청구할 수 있습니다.

* 운반 도중 분실, 훼손, 지연 등의 분쟁처리는 배송회사의 약관을 따르고, 운반 도중의 사고에 대해 판매업체는 책임을 지지 않습니다.

CPR Training Model

Sherpa

A-313, Samsung Techno-valley, 140, Tongil-ro,
Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 10594, Republic of Korea
Homepage: www.btinc.co.kr / E-mail: btinc@btinc.co.kr
Tel: +82-2-2038-2903, +82-51-903-1144 / Fax: +82 303-3130-0607

Copyright(c) BT Inc. All rights reserved.