


BT-CSIE-T

기도 삽관 훈련용 인체모형

USER'S GUIDE

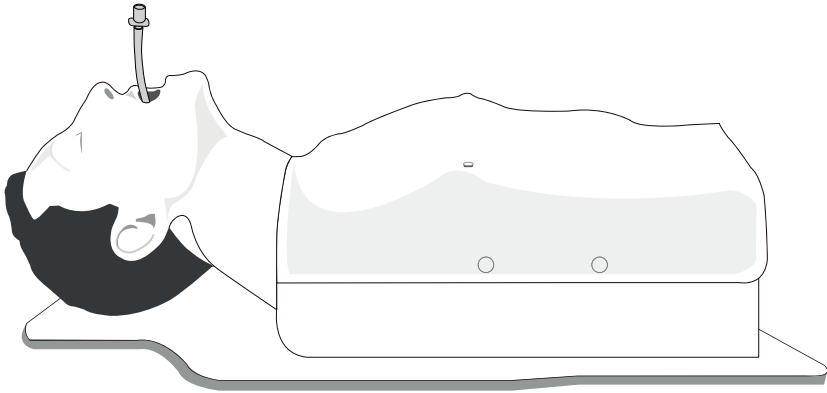

■ 제품 정보

제 품 명	기도삽관 평가용 시뮬레이터
모 델 명	BT-CSIE-T
제 조 사	주식회사 비티
제 조 국	대한민국

■ 제품 사양

크 기	700 X 300 X 240mm
무 게	8.5kg

■ 제품 서비스 문의

홈페이지	www.btinc.co.kr
주 소	본사 : 경기도 고양시 덕양구 통일로 140, A동 313호 영업/판매 : 부산광역시 남구 전포대로 92번길 27, 부산빌딩 5층
연 락 처	본사 : 02-2038-2903 영업/판매 : 051-903-1144
E-mail	bt@btinc.co.kr


■ 주의사항

제품의 올바른 사용과 사용자의 안전을 위한 주의사항이므로 반드시 숙지하여 주시기 바랍니다.


주의사항을 이행하지 않아 발생하는 모든 사고에 대하여 회사(제조회사)에서는 배상의 책임을 지지 않습니다.

- ① 제공된 구성품 이외의 기기를 연결하여 사용하지 마십시오.
- ② 설명서에 기재되어 있는 사항 외에 다른 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
- ③ 제품을 임의로 분해 또는 개조할 경우 서비스(A/S)를 받으실 수 없습니다. 또한, 상업적 목적으로 제품을 개조 또는 모방할 경우 법적 제재를 받게 되오니 주의하시기 바랍니다.
- ④ 제품 보관 시 너무 뜨거운 장소나 추운 곳은 가능한 피해 주십시오. 외관 변형이나 제품 내부의 손상이 발생 할 수 있습니다.
- ⑤ 제품의 표면에 솔벤트 유형의 강력 세제나 화학약품 등이 묻을 경우, 변색 또는 코팅/도색이 벗겨질 수 있으므로 각별히 유의하여 주시고, 묻었을 경우에는 즉시 부드러운 천을 이용해 가볍게 닦아내 주시기 바랍니다.
- ⑥ 제품의 성능향상을 위해서 별도의 고지 없이 당사에서 제품 사양을 수정 또는 변경할 수 있습니다.

■ 구성품

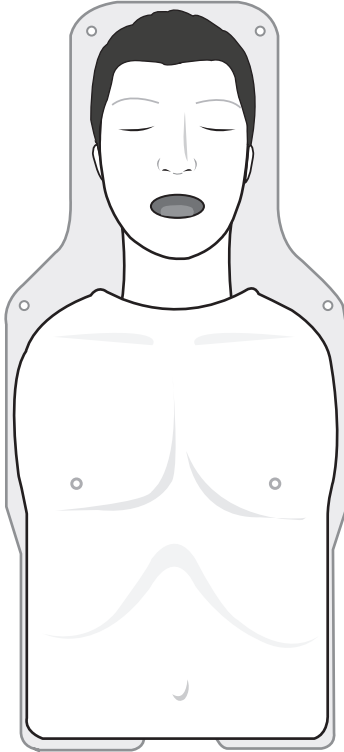

성인 상반신 모형

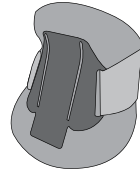

목 보호대



기도삽관용 윤활제

* 기타 - 보관용 가방, 피부 고정핀(8개)


■ 소모품 & 실습 권장 기구

소모품	
<ul style="list-style-type: none"> • 피부(얼굴, 몸통, 머리) • 기도삽관용 윤활제 	<ul style="list-style-type: none"> • 교체용 기도


실습 권장 기구	
ETT	I.D. 7.0~8.0mm
l-gel / LMA	#3, #4
Combi-tube	37Fr
OPA	88mm(Green)
NPA	6~7(24~28Fr)

- BT-CSIE-T 제품과 함께 사용할 경우 다음과 같은 실습 기구 사이즈를 권장합니다.
- 다른 사이즈의 기구는 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 실습자의 숙련도에 따라 소모품 교체 기간은 상이할 수 있습니다.


■ 마네킹 기능 구현

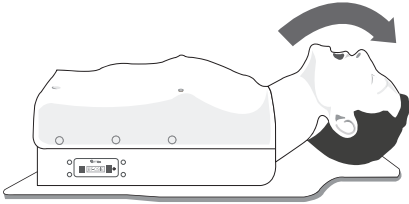


1. 머리 기울이기 (Head tilt)

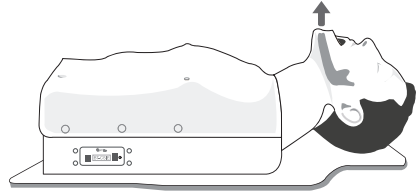


2. 턱 밀어올리기 (Jaw thrust maneuver)

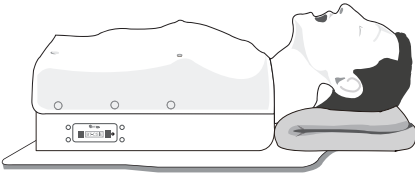

3. 스니핑포지션 (Sniffing position)

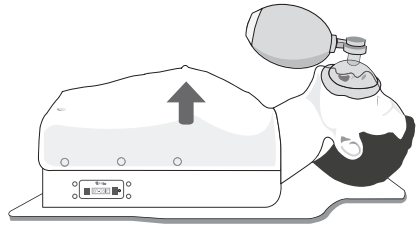


4. 백밸브마스크 환기 (Ventilation)

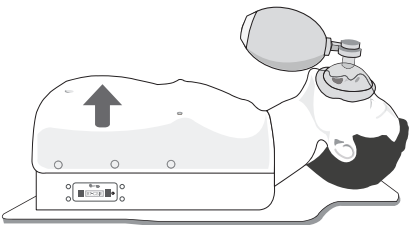

5. 복부팽만 (Gastric inflation)

※ 복부팽만은 인공호흡을 너무 세게, 너무 많이, 너무 자주 하거나 튜브를 식도로 삽관하여 환기 할 경우 발생하게 됩니다.

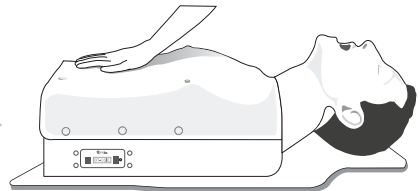

6. 복부 바람빼기 (Deflation by hand)

※ 복부팽만이 발생 한 경우, 손으로 복부를 살짝 눌러서 공기를 빼줍니다.

BT-CSIE-T

기도 삽관 평가용 시뮬레이터

경기도 고양시 덕양구 통일로 140, A동 313호(등산동, 삼성테크노밸리)

Homepage: www.btinc.co.kr / E-mail: bt@btinc.co.kr

Tel: +82-2-2038-2903, +82-51-903-1144 / Fax: +82 303-3130-0607

Copyright(c) BT Inc. All rights reserved.